

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/acustivum-spray-do-uszu-20-ml-p-380.html>



ACUSTIVUM SPRAY DO USZU 20 ml

Cena	14,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3431
Producent	Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
Rodzaj	Suplement diety

Opis produktu

ACUSTIVUM SPRAY DO USZU 20 ML
WYRÓB MEDYCZNY

MECHANIZM DZIAŁANIA:

Składniki wyrobu medycznego Acustivum w łagodny sposób zmiękczają woskowinę zalegającą w zewnętrznym przewodzie słuchowym i delikatnie natłuszczają przewód słuchowy, ułatwiając wydostanie się woskowiny na zewnątrz i usuwanie w ten sposób korków woskowinowych.

Produkt umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu i pomaga chronić uszy przed infekcjami, pielęgnuje skórę zewnętrznego przewodu słuchowego.

Przy stosowaniu profilaktycznym preparat zapobiega powstawaniu korków woskowinowych poprzez wspieranie naturalnego procesu samooczyszczania się przewodu słuchowego.

Preparat, powlekając skórę przewodu słuchowego delikatnym filmem, tworzy barierę dla wody, przeciwdziałając jej przedostaniu się do wnętrza ucha i zaleganiu wody w uchu podczas kąpieli czy uprawiania sportów wodnych.

Olej słonecznikowy, olej ze słodkich migdałów, oliwa z oliwek oraz olej jojoba, zawarte w preparacie, pielęgnują często wysuszoną lub podrażnioną skórę zewnętrznego przewodu słuchowego.

WSKAZANIA:

Stosowanie wyrobu medycznego Acustivum jest wskazane u osób:

- z nadmierną produkcją woskowiny w uszach
- z często tworzącymi się korkami woskowinowymi
- ze zniekształconym lub zwężonym przewodem słuchowym zewnętrznym
- z tendencją do wysychania woskowiny usznej
- używających urządzeń ze słuchawkami umieszczanymi w przewodzie słuchowym zewnętrznym

(np. osoby niedosłyszające noszące aparaty słuchowe; używające zestawów słuchawkowych do

telefonów czy innych urządzeń elektronicznych)

- uprawiających sporty wodne (np. pływanie, nurkowanie)
- po zabiegach operacyjnych – tylko po konsultacji z lekarzem.

Wyrób medyczny Acustivum przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci od 6. miesiąca życia.

SKŁAD:

Olej słonecznikowy, olej ze słodkich migdałów, parafina ciekła, oliwa z oliwek, olej jojoba, polisorbat 80, PPG-8, tokoferol (witamina E), palmitynian askorbylu (witamina C), kwas askorbinowy (witamina C), kwas cytrynowy, alkohol benzylowy, fenoksyetanol, etylheksylgliceryna. Preparat nie zawiera wody.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Nie stosować w przypadku chorób uszu, perforacji błony bębenkowej lub gdy w uchu znajduje się ciało obce.

Nie stosować preparatu do oczu, nosa lub jamy ustnej.

Nie stosować u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

STOSOWANIE:

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie wyrobu medycznego Acustivum.

Ze względów higienicznych zalecane jest stosowanie wyrobu tylko przez jednego użytkownika.

Należy uważnie przeczytać całą instrukcję użycia, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące prawidłowego stosowania produktu. Wyrób medyczny Acustivum jest dostępny bez recepty. Należy zachować instrukcję użycia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dzieci i niemowlęta od 6. miesiąca życia:

1 rozpylenie do przewodu słuchowego zewnętrznego

Dorośli:

1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznego

Rozpuszczanie korków woskowych:

- stosować 2-3 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny.

Działanie profilaktyczne oraz higiena uszu:

- stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowych,
- stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania zalegania wody w uchu.

Po zastosowaniu wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu słuchowego.

Wyrób medyczny Acustivum jest wyrobem wielokrotnego użytku. Po każdym użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 15°C do 25°C.

Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Nie stosować wyrobu medycznego Acustivum po upływie terminu ważności, zamieszczonego

na opakowaniu.

WYTWÓRCA:

Natur Produkt Zdrowit Sp. z o.o., ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa