

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/biocanto-care-woda-morska-100-ml-p-750.html>

BIOCANTO CARE Woda morska 100 ml



Cena	19,90 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6450
Kod EAN	5907713353001
Producent	Biocanto

Opis produktu

Woda morska Biocanto Care to izotoniczny roztwór wody morskiej pochodzącej z Oceanu Atlantyckiego. Wyrób nawilża błony śluzowe jam nosowych, zmiękcza zaschniętą wydzielinę i wspomaga jej usuwanie, przywracając prawidłowe funkcje nosa. Regularne stosowanie wyrobu zapewnia odpowiednią pielęgnację i higienę nosa, przez co zapobiega infekcjom oraz alergiom. Wodę morską Biocanto Care można stosować długotrwale ponieważ nie zawiera konserwantów ani propelentów.

BIOCANTO CARE Woda morska to izotoniczny roztwór wody morskiej pochodzącej z Oceanu Atlantyckiego. Wyrób nawilża błony śluzowe jam nosowych oraz zatok, zmiękcza zaschniętą wydzielinę i wspomaga jej usuwanie, przywracając prawidłowe funkcje nosa. Regularne stosowanie produktu zapewnia odpowiednią pielęgnację i higienę nosa i zatok, przez co zapobiega infekcjom oraz alergiom. Można go stosować długotrwale ponieważ nie zawiera konserwantów ani propelentów.

Składniki: Naturalna woda morska, woda demineralizowana.

Sposób użycia: Zdjąć nasadkę z aplikatora, a następnie delikatnie wsunąć jego końcówkę do każdego otworu nosowego i nacisnąć na 1 - 2 sekundy. Pojemnik ze sprayem do nosa może być używany pod dowolnym kątem.

Dawkowanie:

Niemowlęta (powyżej 6. miesiąca życia) i dzieci do 6 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie, w miarę potrzeby.

Dzieci od 6 lat i dorośli: 1 - 3 dawki do każdego otworu nosowego, kilka razy dziennie, w miarę potrzeby.

Ostrzeżenia: Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. Po każdorazowym użyciu należy umyć końcówkę aplikatora wodą z mydłem i spłukać gorącą wodą.

Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki wyrobu. W przypadku podrażnionej śluzówki nosa, podczas stosowania wyrobu, może wystąpić uczucie pieczenia, które jest normalnym objawem występującym w trakcie stosowania wyrobów zawierających sól morską. W razie pytań należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.