

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/cisnieniomierz-heart-beat-md4140-z-zasilaczem-p-483.html>



CIŚNIENIOMIERZ HEART BEAT MD4140 Z ZASILACZEM

Cena	150,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5554
Kod EAN	4895045404175
Producent	Sanity
Gwarancja	60 miesięcy (5 lat)

Opis produktu

CIŚNIENIOMIERZ HEART BEAT MD4140 Z ZASILACZEM

PROFESSIONAL & COMFORTABLE

Ciśnieniomierz Heart BEAT Sanity® MD 4140 to nowoczesny ciśnieniomierz, który komfortowo i szybko zmierzy skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi u osób dorosłych. Zapisuje w pamięci wewnętrznej aż po 240 wyników dla 4 osób. Dzięki funkcji przypominania, w jaką jest wyposażony, nigdy nie zapomnisz o nadchodzącym pomiarze. Wyniki pojawiają się na bardzo dużym wyświetlaczu. Urządzenie wykorzystuje nieinwazyjną metodę oscylometryczną, w której pompowany mankiet jest nakładany wokół ramienia.

Jest to idealne rozwiązanie do domowego pomiaru u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, chorych na cukrzycę, z wadami serca oraz po przebytym zawale serca.

Ciśnieniomierz Heart BEAT Sanity® MD 4140 to nowoczesny ciśnieniomierz, który komfortowo i szybko zmierzy skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi u osób dorosłych. Zapisuje w pamięci wewnętrznej aż po 240 wyników dla 4 osób. Dzięki funkcji przypominania, w jaką jest wyposażony, nigdy nie zapomnisz o nadchodzącym pomiarze.

Zalety Ciśnieniomierza Heart Beat

- Bardzo duży wyświetlacz i duże cyfry (4 cm)
- System szybkiego i delikatnego pomiaru
- Dodatkowa funkcja wykrywania arytmii
- Przeznaczony dla 4 osób
- Zapamiętuje po 240 pomiarów dla 4 użytkowników
- AVG – funkcja podawania średniej z 7 dni
- Funkcja przypominania o pomiarze
- Duży mankiet – do 36 cm
- Automatyczny, naramienny Ciśnieniomierz Heart BEAT Sanity®, model MD 4140
- Komfortowy mankiet o wymiarach 22-36 cm (w opcji XL 22-44 cm)
- Długi przewód powietrza
- Pokrowiec na wyposażenie
- Instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem

JAK WYKONAĆ POMIAR

1. Mankiet owiń dokładnie wokół ramienia, z przewodem po wewnętrznej stronie ręki. Mankiet jest poprawnie założony, jeśli pomiędzy ramię a materiał można swobodnie wsunąć palec.
2. Usiądź wygodnie, kładąc przedramię na płaskiej powierzchni (jak na rysunku). Pamiętaj, aby mankiet, założony na ramieniu, znajdował się na linii serca.
3. Włącz przycisk start. Pomiar rozpocznie się już w trakcie pompowania mankietu, a po chwili wynik wyświetli się na ekranie. W przypadku wykrycia arytmii na ekranie pojawi się znak serduszek.

STANDARDY

Dokładność zgodna ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętnicznego (ISH):

- ciśnienie w zakresie temperatur 5°C–40°C: ± 3 mm Hg
- wartość tętna: $\pm 5\%$ (dopuszczalne wahania 5%)

DANE TECHNICZNE

- Wielkość urządzenia: 99 x 164 x 46 mm
- Cyfrowy wyświetlacz o przekątnej: 4,8" (12 cm)
- Wielkość cyfr na wyświetlaczu: 4 cm
- Długość mankietu: 22-36 cm (do dokupienia XL 22-44 cm)
- Zasilanie: 4 baterie 1,5V AAA (niezałączone) – ok. 300 pomiarów
- Automatyczny wyłącznik i funkcja oszczędzania energii

Możliwość pracy z zasilaczem:

INPUT: 100-240V, 50/60 Hz

OUTPUT: 6V, 1000 mA

W skład zestawu wchodzi:

- Automatyczny, naramienny Ciśnieniomierz Heart BEAT Sanity®, model MD 4140
- Komfortowy mankiet o wymiarach 22-36 cm (w opcji XL 22-44 cm)
- Długi przewód powietrza
- Pokrowiec na wyposażenie
- Instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem
- zasilacz

ALBERT Polska Sp. z o.o., 32-410 Dobczyce, Ul. Obwodowa 4A