

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/cisnieniomierz-sanity-basic-standard-md-5940-p-480.html>



CIŚNIENIOMIERZ SANITY BASIC STANDARD MD 5940

Cena	85,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11078
Kod EAN	4895045404168
Producent	Sanity
Gwarancja	60 miesięcy (5 lat)

Opis produktu

CIŚNIENIOMIERZ SANITY BASIC STANDARD

EFFICIENT & EASY TO USE

Ciśnieniomierz BASIC STANDARD Sanity® MD 5940 przeznaczony jest do pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi u osób dorosłych. Urządzenie wykorzystuje nieinwazyjną metodę oscylometryczną, w której pompowany mankiety jest nakładany wokół ramienia. Urządzenie jest przeznaczone do codziennego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Wskazane również dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, chorych na cukrzycę, z wrodzonymi lub nabytymi wadami serca oraz po przebytym zawale serca.

Ciśnieniomierz BASIC STANDARD Sanity® MD 5940 przeznaczony jest do pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi u osób dorosłych. Urządzenie wykorzystuje nieinwazyjną metodę oscylometryczną, w której pompowany mankiety jest nakładany wokół ramienia. Urządzenie jest przeznaczone do codziennego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Zalety Ciśnieniomierza Basic Standard

- Łatwa obsługa, czytelny ekran i duże cyfry 2,7 cm
- Ładowanie baterii przez łatwo dostępne łącze USB
- Dodatkowa funkcja wykrywania arytmii
- Przeznaczony dla 2 osób
- Zapamiętuje po 120 pomiarów dla 2 użytkowników
- AVG – funkcja podawania średniej z 7 dni
- 4 lata gwarancji z domu do domu z możliwością przedłużenia do 6 lat

JAK WYKONAĆ POMIAR

1. Mankiet owiń dokładnie wokół ramienia, z przewodem po wewnętrznej stronie ręki. Mankiet jest poprawnie założony, jeśli pomiędzy ramię a materiał można swobodnie wsunąć palec.
2. Usiądź wygodnie, kładąc przedramię na płaskiej powierzchni (jak na rysunku). Pamiętaj, aby mankiety, założony na ramieniu, znajdował się na linii serca.
3. Włącz przycisk start. Pomiar rozpocznie się automatycznie, a po chwili wynik wyświetli się na ekranie. W przypadku wykrycia arytmii na ekranie pojawi się znak serduszek.

STANDARDY

Dokładność zgodna ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętnicznego (ISH):

- ciśnienie w zakresie temperatur 5°C–40°C: ± 3 mm Hg
- wartość tętna: $\pm 5\%$ (dopuszczalne wahania 5%)

DANE TECHNICZNE

- Wielkość urządzenia: 83 x 110 x 60 mm
- Cyfrowy wyświetlacz o przekątnej: 3" (7,5 cm)
- Wielkość cyfr na wyświetlaczu: 2,7 cm
- Długość mankietu: 22-32 cm (do dokupienia XL 22-44 cm)
- Zasilanie: 4 baterie 1,5V AAA (niezałączone) – ok. 300 pomiarów
- Automatyczny wyłącznik i funkcja oszczędzania energii
- Możliwość pracy z zasilaczem Micro USB:
INPUT: 100-240V, 50/60 Hz
OUTPUT: 6V, 600 mA

ZAWARTOŚĆ

- Automatyczny, naramienny ciśnieniomierz BASIC STANDARD Sanity®, model MD 5940
- Komfortowy mankiet o wymiarach 22-32 cm, (w opcji XL 22-44 cm) z nadrukowanym sposobem użycia
- Długi przewód powietrza
- Instrukcja z poradami dla osób z nadciśnieniem

ALBERT Polska Sp. z o. o, 32-410 Dobczyce, Ul. Obwodowa 4A