

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/clinsin-med-zestaw-uzupelniajacy-do-plukania-nosa-i-zatok-30-saszetek-p-584.html>



CLINSIN MED Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok 30 saszetek

Cena	10,80 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17370
Producent	Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
Rodzaj	Suplement diety

Opis produktu

CLINSIN MED

Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok

30 saszetek

Rodzaj: wyrób medyczny

Do płukania nosa i zatok w przypadku:

- **zapalenia zatok**
- **nieżytów nosa**
- **zabiegów chirurgicznych**

Proszek do rozpuszczania, służący do płukania jamy nosowej i zatok, do stosowania u młodzieży (powyżej 12 roku życia) i dorosłych, w celu, oczyszczenia, pielęgnacji, prewencji oraz przy objawach pooperacyjnych nosa i zatok.

Z wyrobu medycznego ClinSin med można przygotować roztwór izotoniczny i hipertoniczny. Roztwór izotoniczny w naturalny sposób oczyszcza nos z zalegających alergenów, bakterii i wirusów. Roztwór hipertoniczny, dzięki działaniu osmotycznemu, poza działaniem oczyszczającym, wykazuje również działanie obkurczające śluzówkę w przypadku infekcji, alergii (katar sienny) oraz stanów zapalnych zatok i zalegania wydzieliny w zatokach.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem należy uważnie przeczytać instrukcję użycia dołączoną do opakowania. Zawartość jednej saszetki (lub 2 dla roztworu hipertonicznego) wsyp do irygatora i uzupełnij ciepłą wodą do odpowiedniego poziomu oznaczonego napisem 240 ml. Dokładnie zakręć butelkę, zatkać otwór w nakrętce palcem i wstrząśnij irygatorem do uzyskania klarownego roztworu. Stań w pozycji nachylonej nad umywalką. Oddychając swobodnie przez usta przyłóż końcówkę nakrętki irygatora do jednego otworu nosa. Płynnie ściśnij butelkę tak, aby połowa roztworu dostała się do otworu nosowego. Nie uciskaj drugiego otworu, musi on pozostać otwarty, aby wypływająca woda wraz z wydzielinami miała ujście na zewnątrz jamy nosowej. To samo powtórz dla drugiego otworu nosa. **NIE POŁYKAJ ROZTWORU!!!** Po płukaniu oczyść nos chusteczką jednorazową poprzez

wydmuchanie. Pozostałą ilość roztworu należy wylać, a zestaw umyć. Do każdego płukania przygotuj świeży roztwór.

Składniki:

Wartości odżywcze

1 saszetka chlorek sodu - 2,16 g

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem i wilgocią. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować po upływie terminu przydatności do użycia.

Producent:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka