

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/termofor-sanity-owieczka-2l-p-495.html>



TERMOFOR SANITY OWIECZKA 2L

Cena	35,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17307
Kod EAN	5907438901983
Producent	Sanity

Opis produktu

TERMOFOR OWIECZKA (2L)

Bawi i rozgrzewa

Termofor gumowy 2l w puszystym pokrowcu. Stosowany w celach leczniczych i profilaktycznych do ogrzewania ciała i łagodzenia bólu. Długo utrzymuje ciepło, a dzięki pokrowcowi w formie pluszowej zabawki jest przyjemny w dotyku i idealny dla wrażliwej skóry dziecka.

Termofor Owieczka naszej produkcji dostępny jest w wariantach o pojemności 2 litrów.

Gumowy materiał doskonale trzyma ciepło, natomiast miękki w dotyku pokrowiec obniża poziom stresu u dziecka, oraz jest łagodny dla delikatnej skóry bobasa. Proste napełnianie wodą, wysoka szczelność, oraz odpowiedni kształt gwarantują długie i wygodne użytkowanie.

Termofor może być stosowany przy bólach brzucha, bólach mięśniowych i reumatycznych, kolkach u niemowląt i dzieci, przeziębieniu i grypie. Działa kojąco na zapalenia stawów, zapalenie ucha, problemy z krążeniem, bóle żołądkowe, schorzenia układu moczowego, skurcze mięśni gładkich, przepuklinę oraz bóle zębów.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50°. Nie stosuj wrzątku oraz wody mogącej wywołać oparzenie. Odkręć zakrętkę i powoli napełnij termofor wodą do $\frac{3}{4}$ jego objętości. W trakcie napełniania trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.
2. Pozbądź się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylanie termoforu, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.
3. Zakręć dokładnie kurek i sprawdź jego szczelność odwracając termofor do dołu. Następnie załóż pokrowiec.

Po użyciu wylej wodę i powieś termofor wlewnem do dołu, w celu jego osuszenia. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikaj kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.

Pokrowiec wykonany jest z poliestru. W razie jego zabrudzenia prać tylko ręcznie, używając mydła i wody o temperaturze do 30°C. Termofor gumowy przemywać wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Termofor może być używany przez dzieci zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Unikaj długiego, bezpośredniego kontaktu ze skórą termofora bez pokrowca. Nie obciążaj termoforu gdy jest on napełniony wodą. Nie siadaj na nim, nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoforze oraz na nim. Przed użyciem każdorazowo sprawdź wyrób

pod kątem zużycia lub uszkodzeń mechanicznych. W razie zniszczenia jednej z części, należy wyrzucić cały wyrób. Zutylizuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga: zastosowanie gorącej wody o temperaturze powyżej 70°C skraca żywotność termoforu, może spowodować jego uszkodzenie i w konsekwencji doprowadzić do oparzenia. Nie podgrzewaj w kuchenke mikrofalowej. Zachowaj instrukcję użytkowania.

Przedstawiciel: Albert Polska Sp. z o.o., Obwodowa 4a, 32-410 Dobczyce