

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/termometr-sanity-basic-temp-cyfrowy-ap-3216-p-69.html>



Termometr SANITY BASICTEMP cyfrowy AP 3216

Cena	11,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17114
Producent	Sanity
Gwarancja	24 miesiące (2 lata)

Opis produktu

Termometr cyfrowy BasicTemp Sanity

Cyfrowy

ZAPROJEKTOWANY DLA CAŁEJ RODZINY

GWARANCJA 24 miesiące (2 lata)

Door-To-Door

Zasady Gwarancji Door-to-door: Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

INFOLINIA: 12 271 33 62

Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Szybki pomiar w tradycyjny sposób

Termometr cyfrowy BasicTemp mierzy temperaturę ciała w sposób dotykowy, w wygodny sposób, zgodnie z preferencjami osoby dorosłej i dziecka. Jest bezpieczny w stosowaniu, a wynik łatwy w odczycie. To podstawowe wyposażenie każdej rodzinnej apteczki. Posiada funkcję automatycznego wyłączenia, która pozwala zaoszczędzić zużycie baterii. Dźwięk sygnalizuje koniec pomiaru. Termometr BasicTemp przeznaczony jest do domowego użytku i kontroli temperatury ciała w trakcie niepokojących zmian w organizmie, a także w celach profilaktycznych.

Nowoczesna alternatywa tradycyjnego termometru dotykowego – termometr cyfrowy BasicTemp z wyświetlaczem, wskazującym wynik pomiaru. To podstawowy, rodzinny termometr do codziennego użytku. Umożliwia wykonanie pomiaru w ustach, odbycie i pod pachą. Krótki czas pomiaru – 1 minuta (usta, odbycie) i 2-3 minuty (pod pachą) zapewnia komfort użytkowania nawet przez dzieci. Na wyświetlaczu wskazywany jest nie tylko wynik pomiaru. Znajduje się tutaj także wskaźnik baterii, pozwalający na kontrolę konieczności ich wymiany. Termometr charakteryzuje się długim czasem pracy i niezwykle dokładnością $\pm 0,1^{\circ}$.

Zalety Termometru BasicTemp

- Łatwy w użyciu standardowy termometr cyfrowy
- Wyświetlacz ze wskaźnikiem zużycia baterii i wynikiem pomiaru

- Pamięć ostatniego wyniku
- Krótki czas pomiaru od 1-3 minut
- Uniwersalny, do zastosowania pod pachą, w ustach i odbycie
- Wyposażony w wodoszczelną końcówkę
- Precyzyjny, z dokładnością pomiaru +/- 0,1°
- Długi czas pracy, do 100 godzin

Cyfrowy termometr marki Sanity przeznaczony dla całej rodziny. Cechuje się krótkim czasem pomiaru i długim czasem pracy (do 100 godzin).

Termometr jest przeznaczony do okresowego pomiaru temperatury i monitorowania jej zmian.

Chociaż ogólnie przyjęta „normalna” temperatura to 37.0°C to odczyt odczyty temperatury mogą różnić się od 36.1°C do 37.2°C i nadal mogą być uważane za „normalne”. Na zmiany temperatury mogą mieć wpływ różne czynniki, np. ćwiczenia, palenie tytoniu, jedzenie i picie. Twoja temperatura jest niższa rano niż po południu. Zróżnicowanie poziomu temperatury może też być uzależnione od położenia punktu odczytu temperatury. Choć temperatura mierzona w ustach odpowiada wytycznym opisanym wcześniej, temperatura odbytu jest zwykle 0.5C wyższa. Odwrotnie, temperatura pod pachą będzie 0.5C niższa.

Instrukcja czyszczenia:

Przed i po każdym użyciu należy oczyścić termometr miękką szmatką i alkoholem izopropylowym rozcieńczonym wodą lub umyć w zimnej wodzie z mydłem. Nie moczyć przez dłuższy okres czasu. Nie sterylizować przez gotowanie w autoklawie, gazowo lub parowo.

Jak zmierzyć temperaturę:

1. Naciśnij przycisk ON / OFF aby włączyć termometr. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i uruchomi się test wyświetlacza.

Test wyświetlacza LCD będzie trwał około 2 sekund.

2. Następnie w prawym rogu wyświetlacza wyświetlony zostanie ostatni pomiar temperatury wraz ze znakiem „M”.

3. Następnie pojawi się „37.0°C”.

4. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się „Lo” i migający symbol „°C” oznacza to, że termometr jest gotowy do pomiaru temperatury. Ale jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 32.0°C, to temperatura w pomieszczeniu będzie wyświetlana zamiast symbolu „Lo”.

5. Po zakończeniu pomiaru temperatury urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

6. Naciśnij przycisk ON / OFF, aby wyłączyć urządzenie.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po około dziewięciu minutach bezczynności.

Mierzenie temperatury w ustach:

Umieść czujnik temperatury termometru pod językiem najbliżej jak to możliwe

przy kieszonce ciepła. Przybliżony czas pomiaru temperatury to 1 minuta.

Mierzenie temperatury pod pachą:

Przetrzyj skórę pod pachami suchym ręcznikiem i umieść końcówkę termometru pod ramieniem, tak aby czujnik temperatury dotykał skóry. Utrzymuj termometr prostopadle do ciała. Umieść rękę na piersi tak aby końcówka czujnika była dobrze pokryta przez ramię. Przybliżony czas pomiaru: 2-3 minuty.

Uwaga: Temperatury uzyskane z pomiaru pod pachą są niższe niż mierzone w ustach o ok. 0.5°C.

Mierzenie temperatury w odbycie:

Należy zastosować smar rozpuszczalny w wodzie na końcówkę (czujnik temperatury). Delikatnie włóż końcówkę termometru (maksymalnie 1/2) do odbytu. Przybliżony czas pomiaru to 1 minuta.

Uwaga: Temperatury uzyskane z pomiaru w odbytnicy są zwykle wyższe niż uzyskane z pomiaru w ustach o ok. 0.5°C.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: Termometr cyfrowy BasicTemp Sanity®

Model: AP 3216

Dokładność: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ($35,0\sim 39,0^{\circ}\text{C}$), $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ inny zakres

Zakres pomiarowy: $32,0^{\circ}\text{C}$ do $42,9^{\circ}\text{C}$

Najniższa wyświetlana temperatura: Temp.

Najwyższa wyświetlana temperatura: Temp. $>42,9^{\circ}\text{C}$: wyświetla $\text{Hi}^{\circ}\text{C}$

Rozdzielczość wyświetlanych wartości: $0,1^{\circ}\text{C}$

Alarm gorączki ($>37,8^{\circ}\text{C}$): 30 krótkich sygnałów dźwiękowych

Normalna temperatura ($\leq 37,8^{\circ}\text{C}$): 10 długich sygnałów dźwiękowych

Automatyczny wyłącznik: 9 minut $\pm$ 2minuty

Bateria: LR41

Żywotność baterii: 2 lata