

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/termometr-sanity-cyfrowy-flexitemp-mt-519-p-491.html>



TERMOMETR SANITY CYFROWY FLEXITEMP MT 519

Cena	15,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2845
Kod EAN	5907438902690
Producent	Sanity
Gwarancja	24 miesięcy (2 lata)

Opis produktu

TERMOMETR CYFROWY FLEXITEMP

Termometr cyfrowy FlexiTemp gwarantuje szybki i bardzo dokładny pomiar temperatury. Pomiar może być dokonany ustnie, rektalnie i pod pachą. Wynik pojawia się już w ciągu 1 minuty od początku pomiaru. Termometr posiada elastyczną, bezpieczną końcówkę, automatyczny wyłącznik zwiększający żywotność baterii, wskaźnik wymiany baterii na wyświetlaczu. Posiada **2 lata gwarancji**.

Właściwości:

- Termometr składa się z: wyświetlacza LCD, czujnika temperatury, przycisku włącz/wyłącz, pokrywy baterii.
- Wynik pojawia się już w ciągu 1 minuty
- Automatyczny sygnał dźwiękowy pojawia się na koniec pomiaru
- Automatyczne zapisanie ostatniego wyniku
- Automatyczny wyłącznik zwiększający żywotność baterii
- Wskaźnik wymiany baterii na wyświetlaczu
- **2 lata gwarancji**

Pomiaru można dokonać doustnie, pod pachą lub rektalnie.

1. Przed pomiarem, należy zdezynfekować czujnik termometru znajdujący się w końcówce, zanurzając go w alkoholu etylowym lub dokładnie wycierając.
 2. Należy nacisnąć przycisk włączania / wyłączania. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i na ok. 2 sekundy uruchomi się test wyświetlacza, a jednocześnie pojawi się dźwięk. Przez kolejne 2 sek. pokaże się ostatni pomiar temperatury. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się Lo°C (Lo°F) oznacza to, że termometr jest gotowy do pomiaru.
 3. Należy umieścić czujnik temperatury w ustach, odbycie albo pod pachą.
 4. Po zakończeniu pomiaru symbol stopni °C (°F) przestanie migać i przez ok. 10 sekund usłyszymy sygnały dźwiękowe. Wynik pomiaru temperatury jest wyświetlany na ekranie LCD.
 5. Po dokonaniu pomiaru, jeżeli zmierzona temperatura wynosi 42,9°C lub 109,9°F, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Hi°C (Hi°F), należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 6. Termometr wyłączy się automatycznie po około 10 minutach.
- Termometr nie jest odporny na wstrząsy, dlatego nie wolno nim rzucać, ani go upuszczać
 - Nie należy zginać obudowy termometru
 - Nie wolno wrzucać sondy do wrzącej wody
 - Nie przechowywać termometru w bezpośrednim świetle słonecznym
 - Nie demontować elementów termometru poza wymianą baterii
 - Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne. Nie wolno moczyć wyświetlacza LCD w wodzie.
 - Jeśli termometr jest używany przez dziecko, zawsze wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

- Zakres i jednostki: 32°C-42,9°C (90,0°F-109,9°F)
- Działanie baterii ok. 200 godz.
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Wymiary: 12,4 x 1,9 x 1,2 cm (DxSxW)
- Termometr jest produkowany zgodnie z systemem EN12470-3, ASTM i spełnia wymagania norm IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

Dane techniczne:

Nazwa produktu: Termometr cyfrowy FlexiTemp Sanity®

Model: MT519

Dokładność: ±0,1°C (35,0~39,0°C), ±0,2°C inny zakres

Zakres pomiarowy: 32,0°C do 42,9°C

Najniższa wyświetlana temperatura: Temp.

Najwyższa wyświetlana temperatura: Temp.>43,0°C: wyświetla Hi°C

Rozdzielczość wyświetlanych wartości: 0.1°C

Alarm gorączki (>37.8°C): 30 krótkich sygnałów dźwiękowych

Normalna temperatura (≤37.8°C): 10 długich sygnałów dźwiękowych

Automatyczny wyłącznik: 8 minut ± 2minuty

Bateria: LR41 lub SR41

Żywotność baterii: 2 lata

Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, 32-410 Dobczyce