

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/termometr-sanity-meditemp-cyfrowy-ect1-p-492.html>



TERMOMETR SANITY MEDITEMP CYFROWY ECT1

Cena	12,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2210
Kod EAN	5907438902683
Producent	Sanity
Gwarancja	24 miesiące (2 lata)

Opis produktu

Termometr elektroniczny Sanity MediTemp ECT-1

Termometr elektroniczny MediTemp Sanity służy do szybkiego i bezpiecznego pomiaru temperatury. Polecany dla całej rodziny jako świetna alternatywa dla termometrów szklanych. Wynik pojawia się już od 40 sekund od początku pomiaru, w zależności od wybranego sposobu mierzenia temperatury. Krótki czas pomiaru oraz wysoka dokładność sprawiają, że MediTemp sprawdza się w trudnych sytuacjach, gdy konieczne jest monitorowanie temperatury.

Właściwości:

- **sygnał dźwiękowy** na koniec pomiaru
- funkcja automatycznego zapisania ostatniego wyniku
- wskaźnik wymiany baterii na wyświetlaczu
- **automatyczne wyłączenie:** 8 minut $\pm$ 2 minuty
- trwałość baterii: ponad 200 godzin ciągłego działania
- **2 lata gwarancji**

Zalety Termometru BasicTemp

- Łatwy w użyciu standardowy termometr cyfrowy
- Wyświetlacz ze wskaźnikiem zużycia baterii i wynikiem pomiaru
- Pamięć ostatniego wyniku
- Krótki czas pomiaru od 1-3 minut
- Uniwersalny, do zastosowania pod pachą, w ustach i odbycie
- Wyposażony w wodoszczelną końcówkę
- Precyzyjny, z dokładnością pomiaru $\pm 0,1^{\circ}$
- Długi czas pracy, do 100 godzin

Cyfrowy termometr marki Sanity przeznaczony dla całej rodziny. Cechuje się krótkim czasem pomiaru i długim czasem pracy (do 100 godzin).

Termometr jest przeznaczony do okresowego pomiaru temperatury i monitorowania jej zmian.

Chociaż ogólnie przyjęta „normalna” temperatura to 37,0°C to odczyt odczyty temperatury mogą różnić się od 36,1°C do 37,2°C i nadal mogą być uważane za „normalne”. Na zmiany temperatury mogą mieć wpływ różne czynniki, np. ćwiczenia, palenie tytoniu, jedzenie i picie. Twoja temperatura jest niższa rano niż po południu. Zróżnicowanie poziomu temperatury może też być uzależnione od położenia punktu odczytu temperatury. Choć temperatura mierzona w ustach odpowiada wytycznym opisanym wcześniej, temperatura odbytu jest zwykle 0,5C wyższa. Odwrotnie, temperatura pod pachą będzie 0,5C niższa.

SPOSÓB UŻYCIA:

Pomiaru można dokonać doustnie, rektalnie lub pod pachą.

1. Aby włączyć urządzenie, naciskamy przycisk włączenia / wyłączenia. Termometr powinien wydać krótki sygnał dźwiękowy i przez 2 sekundy wyświetlić test wyświetlacza.
2. Następnie wyświetli się ostatnio zmierzona temperatura ze znakiem “M” w prawym rogu.
3. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 37,0°C (lub 98,6°F).
4. Gdy wyświetlacz pokaże „Lo” i migającą jednostkę °C (°F), to oznacza, że termometr jest gotowy do pomiaru temperatury.
5. Gdy termometr zakończy pomiar, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a następnie zostanie wyświetlony wynik.
6. Aby wyłączyć termometr, naciskamy przycisk włączenia / wyłączenia (termometr wyłącza się automatycznie po około 10 minutach bezczynności).

Dane techniczne:

- Zakres pomiarowy: 32,0°C (89,6°F) ~ 42,9°C (109,2°F)
- Dokładność pomiaru: ± 0,1°C (0,2°F) w zakresie 35,0°C (95,0°F) ~ 39,0°C (102,2°F), inny zakres: ± 0,2°C (0,4°F)
- Sygnalizacja dźwiękowa stanu gorączki ≥ 37,8°C (100,0°F): 30 krótkich sygnałów dźwiękowych w ciągu 10 sekund
- Sygnalizacja dźwiękowa normalnej temperatury

- Termometr powinien być używany tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno chodzić, biegać i rozmawiać podczas pomiaru temperatury.
- Światło słoneczne, pył lub wilgoć szkodzi urządzeniu, więc należy unikać skrajnych temperatur i warunków przechowywania.
- Termometr nie powinien być narażony na żadne wstrząsy.
- Nie demontować elementów termometru, z wyjątkiem procedury wymiany baterii.
- Przed i po każdym stosowaniu należy przetrzeć termometr miękką ściereczką z alkoholem izopropylowym rozcieńczonym wodą.

Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, 32-410 Dobczyce