

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/unimer-baby-aspirator-no-nosa-dla-dzieci-p-72.html>



Unimer BABY Aspirator no nosa dla dzieci

Cena	16,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13744

Opis produktu

Aspirator umożliwi delikatną aspirację śluzu blokującego kanaliki nosowe niemowlęcia.

Budowa aplikatora do nosa gwarantuje bezpieczną aspirację wydzielin.

Jego zaokrąglony kształt umożliwia styczność z otworem nosowym niemowlęcia, nie stwarzając ryzyka zranienia.

Aplikator jest wykonany z nietłukącego się tworzywa i podlega zimnej lub parowej sterylizacji.

Można wykorzystać go wielokrotnie.

Wskazania:

Można stosować u dzieci, które nie opanowały umiejętności wydmuchiwania noska, a także u dzieci i osób niepełnosprawnych.

W celu przygotowania aspiratora dla niemowląt:

1. Umyj ręce
2. Złóż aspirator dla niemowląt Unimer według schematu
3. Umieść mały kawałek waty, który będzie działał jako filtr, między końcówką aspiratora do nosa a zbiornikiem

W celu przygotowania niemowlęcia:

1. Ułóż dziecko w pozycji leżącej na stoliku do przewijania i podnieść mu głowę
2. Włóż ustnik do ust; mała otoczka ułatwia trzymanie go między zębami
3. Przyłóż końcówkę aspiratora do jednego z otworów nosowych niemowlęcia
4. Delikatnie wciągnij powietrze; wydzieliny będą się gromadzić w zbiorniku
5. W razie konieczności - powtórz czynność
6. Zmień otwór nosowy

Uwaga!!!

Wkroplenie do każdego z otworów nosowych roztworu wody morskiej lub soli fizjologicznej przed przystąpieniem do oczyszczania nosa, znacząco ułatwia usunięcie zalegającej wydzieliny



Apteka Prima mgr farm. Tomasz Buszmał
ul. Myśliwska 9
93-519 Łódź
NIP: 727-134-25-90
